

## Pasos para la utilización



1

### Manejo del material


- Quite el dispositivo del envoltorio
- Quite la funda protectora de plástico azul.
- Sature completamente el producto sumergiéndolo en agua estéril durante 30 segundos.



2

### Técnica de colocación


- Inserte el Rapid Rhino 900 en la ventana nasal del paciente en sentido paralelo al piso del tabique o a lo largo del aspecto superior del paladar duro, hasta que el anillo indicador azul quede introducido en la ventana nasal.

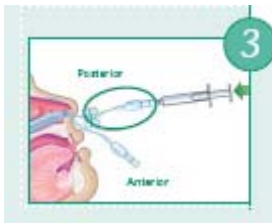

3

### Inflado del manguito posterior\*

- Localice el manguito de inflado con la mariposa protectora de deglución con la línea verde. Esto indica el globo posterior que debe inflarse en primer lugar.
- Utilice una jeringa de 20cc para inflar lentamente el globo posterior sólo con aire.
- Deje de inflar el globo cuando el manguito piloto esté redondeado y firme en la cavidad nasal posterior.

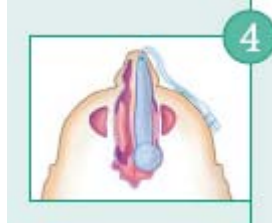

4

### Inflado del manguito anterior

- A continuación, localice el segundo manguito de inflado y úselo sin una mariposa protectora de deglución para inflar el globo anterior. Una vez más, utilice el manguito piloto para mantener constante el estímulo táctil de presión intranasal, pero tenga precaución de no inflar en exceso.


### \*Técnica Pearl

Cuando la presión en el globo posterior sea suficiente, quite la jeringa de la válvula de inflado y lleve el dispositivo suavemente hacia delante, según sea necesario, para asegurarse de que la presión en el sitio de sangrado posterior sea suficiente.



5

- Cuando la presión en ambos globos sea suficiente, pida al paciente que se siente durante 15-20 minutos antes de retirarse. A menudo, la hinchazón de la anatomía nasal se reducirá y los globos tal vez necesiten inflarse un poco más para asegurar la presión apropiada en el lugar de sangrado e impedir el movimiento del dispositivo.
- Antes de que se retire, fije a las mejillas del paciente ambas líneas de inflado con cinta adhesiva.

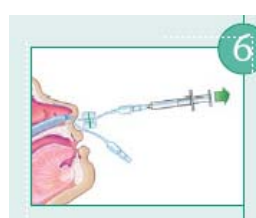

6

### Extracción

- El paciente podría regresar 24-72 horas después de la extracción del dispositivo o consultar a un otorrinolaringólogo para la visita de seguimiento.

### GLOBAL CLINIC

Estoril 50 Oficina 512 – Las Condes- Santiago

Tel. 6517110 Fax. 6517113

[www.globalclinic.cl](http://www.globalclinic.cl) [info@globalclinic.cl](mailto:info@globalclinic.cl)